



PASO 1:

Descomprimir
la carpeta descargada.




PASO 2:

Seleccionar los sistemas
que desee instalar.



PASO 3:

Dentro de cada carpeta encontrará 2 carpetas:

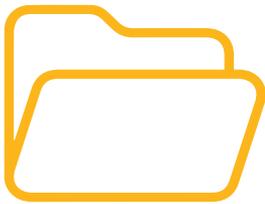

1. Nombre del sistema



2. Nombre del sistema + Replica

PASO 4:

Localizar la carpeta DentalCADApp en su PC:



Copiamos en:

.../DentalCADApp/**library/implant**

la carpeta con el nombre del sistema (1)

Copiamos en:

.../DentalCADApp/library/**modelcreator/Implants**

la carpeta con el nombre del sistema + Replica (2)